

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Чехол изготовлен из двухслойного материала, защищенного водоотталкивающим слоем. Верхний слой изготовлен из полиамида микрофибры в соответствии с нормой ISO 1833. Нижний слой состоит из: хлопка – 55 % и полиэстра – 45 %.

Материал отличается долговечностью: не протирается одеждой и не теряет яркости цвета (ISO I 2947-2); прост в чистке.

Удалите пятна хорошо впитывающей тканью и чистите с нейтральным стиральным порошком. Также вы можете воспользоваться мягкой щеткой. Не используйте никакого типа растворителей или ацетонов! Для наиболее распространенных пятен мы рекомендуем следующую процедуру очистки:

- **МОЛОКО, КОФЕ, ЧАЙ:** используйте 10 % нашатырного спирта;
- **СОКИ И ВИНО:** используйте 50%-ую смесь воды и уксуса;
- **ЖИР, МАСЛО:** удалите пятно сухой поглощающей тканью;
- **ШОКОЛАД, КАРАМЕЛЬ, КРОВЬ:** используйте 5 % нашатырного спирта;
- **КОСМЕТИКА:** используйте 5 % аммиака или 90 % этилового спирта.

Цвет материала может побledнеть, если он не будет защищен от интенсивного и длительного солнечного света. Брючные ремни могут повредить чехол; поэтому мы рекомендуем не надевать брючных ремней во время длительных поездок.



РИСКИ И ГАРАНТИИ

Если вы недовольны ортопедическим устройством КОСМОДИСК ПРЕСТИЖ Модель для Автомобиля, вы можете вернуть его в течение 30 дней со дня покупки, и вам вернут деньги. Никакого риска! Единственное, что вы можете потерять – это боль.

⚠ КОСМОДИСК ПРЕСТИЖ Модель для Автомобиля нельзя использовать с какими-либо другими поддерживающими устройствами для спины, так как это может уменьшить его эффективность и может появиться вероятность повреждения позвоночника в случае аварии.

⚠ Если вы не уверены, можно ли вам пользоваться КОСМОДИСКОМ ПРЕСТИЖ Модель для Автомобиля или долго чувствуете дискомфорт во время его применения, проконсультируйтесь с врачом.

Чтобы получить дополнительную информацию о КОСМОДИСКЕ ПРЕСТИЖ Модель для Автомобиля, обращайтесь по адресу:

ООО «Студио-Модерна»
115477, г. Москва, ул. Кантемировская 58
Тел: (495) 730-02-01
www.kosmodisk.ru

KOSMODISK

Изготовлено в Словении, Евросоюз, Студио Модерна d.o.o.
ул. Подвине 36, 1410 Загорье при Саве, Словения.
Космодиск является зарегистрированной торговой маркой и защищен патентом.

KOSMODISK
Prestige

Инструкция пользователю

**ВАШ
ВЕРНЫЙ
СПУТНИК**

**ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

Спина вам будет благодарна!

О КОСМОДИСКЕ®

КОСМОДИСК® это клинически исследованное устройство, изобретенное экспертами с целью уменьшения или полного устранения боли в области позвоночника. Результаты исследований показали, что КОСМОДИСК® помогает в 80 % случаев. Космодиск очень практичен и удобен в применении, помогает снять боль во время ежедневной работы, занятиях спортом, отдыха или сна. КОСМОДИСК® может успешно сочетаться с другими терапевтическими методами лечения, как традиционными, так и альтернативными.

Космодиск работает исключительно благодаря своей форме – без дополнительных источников энергии, таких как магниты или батарейки.



Уникальная форма Космодиска (изготовленного из гипоаллергенной хирургической резины) не ограничивает ваших движений в течение дня. Конфигурация ребристой стороны воздействует на позвоночник по всей его длине, производя мягкий точечный массаж.

В комплекте КОСМОДИСК ПРЕСТИЖ Модель для Автомобиля:



УСТРОЙСТВО
КОСМОДИСК



УНИКАЛЬНЫЙ
ЧЕХОЛ
Изготовлен из
полиамида
микрофибры

КОСМОДИСК ПРЕСТИЖ Модель для Автомобиля

Ежедневное вождение изнурительно и болезненно для спины. Тело находится в постоянном сидячем положении и подвержено постоянной вибрации из-за неровностей дороги.

КОСМОДИСК ПРЕСТИЖ Модель для Автомобиля - специальная модель Космодиска, разработанная для использования во время движения в транспорте (автомобиль, автобус, поезд). Он успешно устраняет боль в позвоночнике и в поясничном отделе, появляющиеся в связи с вибрациями и длительным нахождением тела в сидячем положении во время вождения.

Согревает, облегчает боль, снимает спазм мышц, улучшает кровообращение.

Массажный эффект Космодиска стимулирует мышцы в области позвоночника и создает тепловой эффект, который улучшает микроциркуляцию крови, успокаивает мышцы и уменьшает напряжение. КОСМОДИСК ПРЕСТИЖ Модель для Автомобиля также обеспечивает дополнительную поддержку спины, уменьшает усталость из-за долгого нахождения в сидячем положении и делает вождение автомобиля более комфортным.

Мы рекомендуем КОСМОДИСК ПРЕСТИЖ Модель для Автомобиля всем водителям и их пассажирам, которые проводят много времени в транспорте.

Чехол выпускается в следующих трех цветах:

- Голубой
- Серый
- Бежевый



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Поместите КОСМОДИСК ПРЕСТИЖ Модель для Автомобиля на спинку водительского сидения гладкой стороной к сидению; ребристая сторона Космодиска должна прилегать к позвоночнику.



1. Проденьте верхний эластичный ремень между сидением и подголовником вашего сидения.



2. Нижние эластичные ремни поместите вокруг спинки сидения.

3. Застегните застежку позади сидения.

4. Используйте «ползунок» для регулировки длины эластичных ремней.

КОСМОДИСК ПРЕСТИЖ Модель для Автомобиля может крепиться к обоим передним сидениям.

Мы советуем проверять Космодиск на наличие повреждений хотя бы раз в полгода. Если появились какие-либо изменения в форме, КОСМОДИСК ПРЕСТИЖ Модель для Автомобиля следует снять.

ПРИМЕЧАНИЕ: Телу необходимо время, чтобы привыкнуть, адаптироваться к Космодиску – поэтому сначала может появиться дискомфорт, неприятные ощущения. Но они исчезнут в течение 3-4 часов. Лучше всего вы сможете прочувствовать эффект Космодиска, если будете легко одеты.

КОСМОДИСК ПРЕСТИЖ Модель для Автомобиля отличается доказанной эффективностью системы КОСМОДИСК и эксклюзивным внешним видом. Он предназначен для всех, кто проводит большую часть дня сидя (в офисе, в автомобиле и т.д.), а не только для тех, кто страдает от хронических болей в позвоночнике и /или поясничном отделе.